

## MY TOBII OOGBOLBESTURING

**Met het MyTobii oogbolbesturingssysteem hebben personen met zeer beperkte bedienmogelijkheden toegang tot communicatie en omgevingsbediening. De MyTobii P10 heeft een 15" aanraakscherm met een ingebouwde camera en een geïntegreerde computer. Met deze camera volgt MyTobii de bewegingen van de ogen.**

MyTobii registreert de locatie waarnaar wordt gekeken en activeert dit onderdeel na bedienen van een schakelaar of automatisch, als de ogen enige tijd naar hetzelfde object hebben gekeken. Ook is het mogelijk op deze wijze de muisaanwijzer over het scherm te bewegen en te klikken.



Bij het eerste gebruik wordt er een calibratie uitgevoerd op de gebruiker. Deze calibratie kan worden opgeslagen als een profiel. Een volgende keer dat de gebruiker met de MyTobii gaat werken, worden de ogen gedetecteerd en is het systeem direct klaar voor gebruik.

Lichaamsbewegingen vormen geen belemmering voor het functioneren van MyTobii.

Door gebruik van profielen is het mogelijk meerdere personen met één apparaat te laten werken.

Door de communicatiesoftware The Grid te installeren, heeft de gebruiker toegang tot een beeldschermtoetsenbord. Communiceren met The Grid kan op basis van tekst of symbolen, met of zonder spraak. Met de juiste software is ook omgevingsbediening mogelijk. Zodoende kan de gebruiker zelf audiovisuele apparatuur bedienen, gordijnen en deuren openen, verlichting bedienen, et cetera.

### Technische gegevens:

Beeldscherm:	15" aanraakscherm
Besturing:	Windows XP
Gewicht:	5,5 kg
Werkafstand:	50-65 cm
Aansluitingen:	2 x USB, Infra Rood voor omgevingsbesturing (optioneel)

### Artikelnummer:

<b>TOB-P10</b>	Oogbolbesturing type P10 compleet
<b>TOB-P10P</b>	Oogbolbesturing type P10 portable
<b>TOB-1750</b>	Oogbolbesturing type 1750

