



## Grid bundels exporteren

Start The Grid op  
Open de juiste bundel  
Als u nog geen menubalk bovenin heeft, druk op F12

Bestand  
Paginaverkenner

Klik 1 keer, zodat deze lichtblauw wordt, op de rood omcirkelde pagina set

Druk in de linker kolom op:  
Opslaan als Grid Bundel  
U krijgt nu een pop-up.  
Zet alle vinkjes aan en druk op OK

U kunt nu de bestandslocatie selecteren, bijvoorbeeld een USB stick  
Herhaal dit voor alle bundels die u op wenst te slaan

## Grid bundels importeren

Start The Grid op  
Druk in de linker kolom op  
Paginabundel importeren  
Selecteer de bundel die u wenst te importeren, bijvoorbeeld vanaf een USB stick

U krijgt nu een pop up.  
Kies hier altijd 'nieuwe gebruiker creëren'  
Druk op OK.

Herhaal dit voor alle bundels die u op wenst te importeren.

<http://sensorysoftware.com/answers/importing-and-exporting-grid-bundles/>



## Grid bundels als opstartbundel selecteren

Start The Grid op

Klik 1 keer, zodat deze lichtblauw wordt, op de bundel waarmee u wilt dat The Grid opstart.  
Druk in de linker kolom op: 'Als startgebruiker instellen'

## Grid automatisch op laten starten

Start The Grid op

Druk in de werkbalk op:

Bestand

Voorkeursinstellingen

Selecteer: Standaard gebruiker opstarten

Kies de juiste pagina set

Zet het vinkje aan bij 'Opstarten bij Windows opstarten'.

<http://sensorysoftware.com/answers/how-do-i-make-the-grid-2-start-when-i-turn-on-my-computer/>

**Indien u er met deze aanwijzingen niet uitkomt verwijzen wij u graag door naar [http://sensorysoftware.com/grid-software-for-aac/grid2\\_aac\\_software/](http://sensorysoftware.com/grid-software-for-aac/grid2_aac_software/). Mocht u toch assistentie van één van onze medewerkers nodig hebben zijn wij helaas genoodzaakt om dit, wanneer meer dan 15 minuten assistentie verleent is, in rekening te brengen. Voor assistentie dient van te voren een afspraak gemaakt te worden.**